

Marvel Magic Moment

Kurzanleitung Sound-Demonstration

Benötigte Ausstattung:

- Marvel Hörgeräte (aktuelle Firmware)
- Roger Select™ iN
- Pin-Tool (= Aus- und Einbauwerkzeug für Sicherungstift, wenn nicht vorhanden, bitte separat bestellen)
- Lautsprecher, um Störlärm abzuspielen



Marvel Hörgeräte mit Roger Select iN

Ort und Dauer:

Anpasskabine, 7 Minuten

Ablauf:

1. Roger Funktion in Marvel Hörgeräten aktivieren

Sofern keine Änderungen vorgenommen wurden, sind die Marvel Hörgeräte so programmiert, dass Roger automatisch erkannt und aktiviert wird.



Roger Select iN einschalten, Installationstaste 2 s mit dem Pin-Tool drücken bis die LED blinkt



Hörgerät einschalten



Hörgerät neben Roger Select iN legen bis die LED durchgehend leuchtet

2. Demonstration Hörsituation im Lärm, z.B. im Restaurant oder auf Familienfeiern

- Störlärm über die Lautsprecher abspielen
- Erklären was passiert
- Roger Select iN einschalten
- Reaktion beobachten
- Select iN ausschalten und mit Kunden weitersprechen – Marvel Magic Moment
- Optional: Unterschiedliche Modi aufzeigen

3. Demonstration Hörsituation Distanz, z.B. Vortrag oder Stadtführung

- Langsam vom Hörgeräteträger entfernen und Anpassraum verlassen
- Erklären was passiert
- Roger Select iN einschalten
- Reaktion beobachten
- Select iN ausschalten und mit Kunden weitersprechen – Marvel Magic Moment

